

Návod pro použití gynekologického zrcadla:

1. Otevřete sterilní ochranný obal odtržením jeho části v označeném místě (v případě porušení ochranného sterilního obalu zrcadlo nepoužívat !)
2. Vytáhněte zrcadlo z obalu
3. Zasuňte zrcadlo do pochvy zaobleným a tenčím koncem napřed
3. Rozevřete čelisti zrcadla na potřebnou šířku sevřením jeho rukojetí
4. Zafixujte zvolené rozevření otočením aretačního kolíku
5. Proveďte potřebné úkony (kolposkopii, odběry cytologie, poševní kultivace atd.)
6. Uvolněte fixační kolík a zavřete čelisti zrcadla rozevřením rukojetí od sebe
7. Po vyjmutí zrcadla z pochvy odložte použité zrcadlo do nádoby s infekčním odpadem

Výrobce:

Changzhou Huankang Medical Device Co., Ltd.
Jiaoxi Industrial District, Changzhou,
Jiangsu 213116, China

Zplnomocněný zástupce v EU:

Renault –Petersen Limited,
5 Bankside, Hanborough Business Park,
Whitney OX29 8LJ, United Kingdom